

ANIOXY-TWIN



DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL
PARA INSTRUMENTAL CLÍNICO
Y ENDOSCOPIOS



Desinfección Alto Nivel

Indicaciones:

Desinfectante de alto nivel de material quirúrgico, médico, material de endoscopia, material termosensible y productos sanitarios.

Composición:

- Tapón rojo: Frasco de 120 ml que contiene ácido peracético al 5% en presencia de peróxido de hidrógeno y ácido acético.
- Tapón azul: Frasco de 50 ml que contiene inhibidores de la corrosión, un indicador de color y otros excipientes.

Modo de empleo:

Limpiar y enjuagar cuidadosamente todo el instrumental antes de sumergirlo en Instrunet® Anioxy-Twin.

**ACTIVAR
Y USAR**

Verter los dos frascos en 5 litros de agua y homogeneizar la mezcla. Sumergir el instrumental en la solución y dejar actuar durante 15 minutos para la desinfección de alto nivel y eficacia esporicida. Enjuagar con agua filtrada o estéril y secar cuidadosamente.

Para garantizar la eficacia desinfectante, verificar la tasa de ácido peracético con la ayuda de las tiras de control.

Precauciones:

Información disponible en la ficha de datos de seguridad y en la etiqueta.

Presentaciones:

Ref. 2918: 1 Envase de 120ml + 50ml (Cajas de 12 unidades)
Ref. 3033: 1 Envase con 50 tiras de control (se adquieren por separado, no incluidas con el producto)



CE
0459

EFICACIA	BACTERICIDA	FUNGICIDA	VIRICIDA	MICOBACTERICIDA	ESPORICIDA	Activo frente a: VIH-1 BVDV (virus modelo VHC) PRV (virus modelo VHB)
Tiempo de acción	5 minutos	15 minutos	10 minutos	10 minutos	15 minutos	10 minutos
Normativas	EN 1040 EN 13727 EN 14561	EN 1275 EN 13624 EN 14562	EN 14476	EN 14348 prEN 14563	NFT 72 - 230/231	NFT 72-180 DVV / RKI

Rendimiento:



1 envase
120 ml + 50 ml



Solución preparada
5 litros