

# ANIOXY-SPRAY WS

AMPLIO  
ESPECTRO

DETERGENTE DESINFECTANTE  
PARA PRODUCTOS SANITARIOS



**Indicaciones:**

Detergente desinfectante en spray de amplio espectro para productos sanitarios no sumergibles y no invasivos (estetoscopios, cables y dispositivos de conexión, sensores de presión, glucómetros, etc...)

**Composición:**

Peróxido de hidrógeno (50mg/g)  
Etanol (91,6 mg/g) en medio acuoso.

**Modo de empleo:**



Pulverizar uniformemente sobre la zona a tratar o sobre un paño no-tejido limpio y seco, respetando los tiempos de contacto indicados según la actividad antimicrobiana deseada. No enjuagar salvo en caso de contacto prolongado de la superficie con la piel o mucosas. Para uso profesional.

**Precauciones:**

Información disponible en la ficha de datos de seguridad y en la etiqueta.

**Presentaciones:**

Ref. 3696 – Envase de 1L + pulverizador  
(Caja con 6 unidades + 6 pulverizadores)



EFICACIA	BACTERICIDA	LEVADURICIDA	FUNGICIDA	TUBERCULICIDA	ESPORICIDA	VIRICIDA
Tiempo de acción	5 minutos	5 minutos	15 minutos	60 minutos	60 minutos	30 minutos
Normativas	EN 1040 EN 13727	EN 1275 EN 13624	EN 1275 EN 13624	EN 14563	EN 13704	EN 14476+AI

EFICACIA	Activo frente a: <i>Bacillus subtilis</i>	Activo frente a: <i>Clostridium difficile</i>	Activo frente a: PRV (virus modelo VHB)	Activo frente a: BVDV (virus modelo VHC)
Tiempo de acción	60 minutos	30 minutos	15 minutos	5 minutos
Normativas	EN 13697 EN 14561	EN 13697	NF T 72-180 DW / RKI	NF T 72-180 DW / RKI