

# LAB POLVO

LIMPIEZA MANUAL

DETERGENTE DE INSTRUMENTAL  
DE ÁMBITO CLÍNICO



### Indicaciones:

Limpieza manual de instrumental clínico. Elimina de forma eficaz la suciedad y marcas de rotulador. No mancha.

### Composición:

Metasilicato sódico, tensioactivos aniónicos, tensioactivos anfotéricos, secuestrantes y excipientes c.s.p.

### Modo de empleo:



- Material poco contaminado o de riesgo medio: Disolver 1 sobre (50g) en 5 litros de agua y sumergir el instrumental durante 15 minutos a temperatura ambiente, aclarar y secar.
- Material muy contaminado o de riesgo alto: Disolver 2 sobres (2x50g) en 5 litros de agua, y sumergir el instrumental durante 15 minutos en agua caliente (40°C), aclarar y secar.  
No utilizar con instrumental de aluminio.



### Precauciones:

Información disponible en la ficha de datos de seguridad y en la etiqueta.

### Presentaciones:

Ref. 72 – 1 Sobre de 50 g. (Caja de 100 unidades)

### Rendimiento:

